



DATI TECNICI

Poteri: da -8 a +8

Addizioni: 0.75 - 6.00

Materiale: CR39

Filtro: Comfort Filter, C1

Trattamento: ML Prima

Tipi: Monofocali, bifocali e progressive

DEGENERAZIONE MACULARE SENILE

Le persone con degenerazione maculare senile hanno difficoltà nel trovare soluzioni in grado di aiutarle in modo significativo.

Normalmente, vengono proposte lenti standard che non possono aiutarli significativamente. Un occhio con degenerazione maculare senile ha bisogno di qualcosa di più di una correzione diottrica. C'è qualcosa di più efficace da proporre.

AMD COMFORT offre a coloro che soffrono di degenerazione maculare senile un significativo miglioramento della vista, abbinato ad uno stato di comfort visivo. È facile da comprendere, facile da provare e ultimo, ma non meno importante, facile da prescrivere e ordinare.

AMD COMFORT è un programma speciale di lenti oftalmiche sviluppate per le persone che soffrono di degenerazione maculare senile. AMD COMFORT offre un sensibile miglioramento alla loro capacità visiva con un ottimo comfort.

COMFORT FILTER

Il filtro comfort appositamente sviluppato offre agli occhi la migliore protezione possibile dall'aggressività della luce UV, mentre riduce la sensibilità all'eccessiva luminosità della luce diurna. Questo filtro in sostanza riduce il passaggio della parte blu dello spettro UV, mentre il resto dello spettro del visibile è mantenuto e contribuisce a garantire una visione del colore naturale.

INGRANDIMENTI


Le lenti per AMD forniscono un ingrandimento che implica un impiego di una parte maggiore di retina nel processo della visione. L'ingrandimento è sufficiente per fare la differenza per chi lo indossa ma non così forte da ridurre il campo visivo.

L'ingrandimento è raggiunto con una speciale molatura che rende le lenti leggermente più curve e più spesse. Ci sono due ingrandimenti disponibili AMD-I e AMD-II. AMD-I fornisce un equilibrio tra aspetto estetico e ingrandimento, mentre AMD-II garantisce un maggiore ingrandimento a fronte di uno spessore maggiore. AMD-I significa un ingrandimento del 3% circa mentre AMD-II è del 6% circa. L'esatto ingrandimento può variare leggermente in eccesso o in difetto, in ragione della prescrizione o delle lenti scelte.

Altre percentuali di ingrandimento possono essere richieste fino al 91%.

RIDUZIONE RIFLESSI

Il trattamento antiriflesso è standard sulle lenti AMD

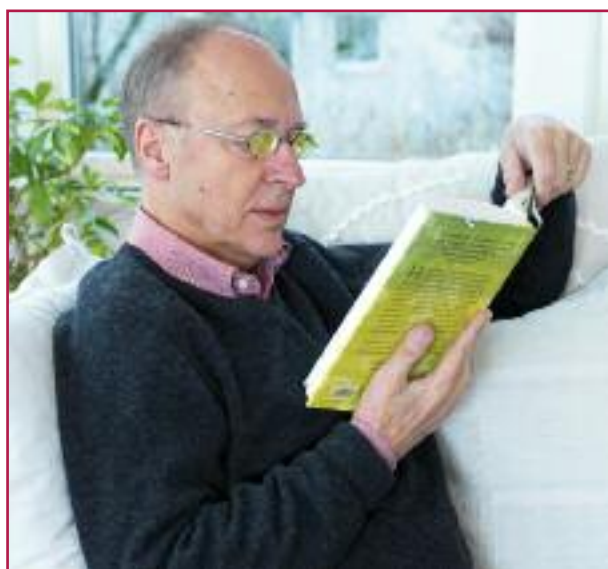

COMFORT, per migliorare il comfort e ridurre l'abbagliamento.

CORREZIONI INCORPORATE

Tutte le lenti AMD COMFORT sono realizzate appositamente su prescrizione per fornire la miglior correzione possibile.

FACILE DA USARE, FACILE DA PRESCRIVERE

Le lenti AMD COMFORT sono ausili di provata tecnologia ottica, semplice da prescrivere e molto efficace per aiutare pazienti con DEGENERAZIONE MACULARE SENILE o altre situazioni in cui risulti ridotta la capacità visiva.

FACILE DA PROVARE

Per testare le lenti AMD COMFORT su un paziente si possono utilizzare dei semplici set di prova. Fate sperimentare al paziente la differenza fissando un flip up AMD COMFORT sul suo occhiale o posizionando il flip up davanti alle lenti già in uso.

FACILE DA ORDINARE

La procedura per ordinare una lente con AMD COMFORT, è la stessa utilizzata per ordinare delle normali lenti di prescrizione.

FACILE DA USARE

Le lenti AMD COMFORT non richiedono tempi di adattamento per l'utilizzatore finale; il paziente sarà immediatamente in grado di cogliere il beneficio che deriva dal maggior contrasto, dalla maggiore acuità visiva e dal miglior comfort.



VANTAGGI

- Massima protezione
- Miglioramento della visione
- Ottimo contrasto

Le lenti AMD COMFORT offrono alle persone che soffrono di degenerazione maculare senile un ottimo miglioramento del comfort visivo proteggendo gli occhi dai nocivi raggi UV.

LENTI AMD COMFORT

Qui sotto troverete le principali informazioni per realizzare lenti di prescrizione con AMD COMFORT. In caso di richieste al di fuori di quanto già specificato, contattateci per una verifica.

PROGRESSIVE

- ampio campo visivo
- design semplice
- possibilità di forti addizioni
- possibilità di aggiungere polarizzazione e trattamento fotocromatico.

MONOFOCALI

- possibilità di aggiungere polarizzazione e trattamento fotocromatico.

BIFOCALI





- possibilità di alte addizioni
- possibilità di aggiungere polarizzazione e trattamento fotocromatico.

AMD COMFORT LENS limiti di costruzione

Attenzione alle seguenti note tecniche:

- Correzione cilindrica fino a -6, curvatura massima non oltre Base 6.
- Per poteri oltre i limiti sopra riportati e livelli di ingrandimento, contattateci.
- Lenti con diametro fino a 75 mm (73 per le polarizzate).
- Tutte le lenti AMD COMFORT sono in indice 1.5.

Lenti AMD comfort	+ Stero	- Stero	Prisma
Progressive AMD I	+8	-8	4
Progressive AMD II	+6	-6	3
Progressive AMD I con polarizzazione o transition	+6	-6	4
Progressive AMD II con polarizzazione o transition	+4	-4	3
Monofocali AMD I	+8	-8	4
Monofocali AMD II	+6	-6	3
Monofocali AMD I con polarizzazione o transition	+6	-6	4
Monofocali AMD II con polarizzazione o transition	+4	-4	3
Bifocali S28 AMD I, neutre e polarizzate	+8	-6	4
Bifocali S28 AMD II, neutre e polarizzate	+6	-8	3
Bifocali C28 AMD I, neutre e transition	+8	-6	4
Bifocali C28 AMD II, neutre e transition	+6	-8	3
Bifocali S28 High Add AMD I, neutre	+8	-6	2
Bifocali S28 High Add AMD II, neutre	+6	-8	2

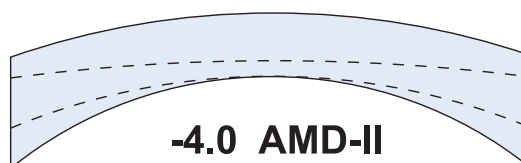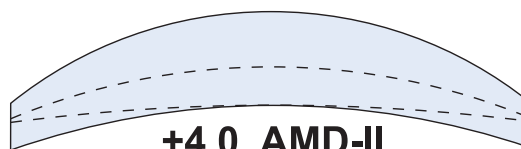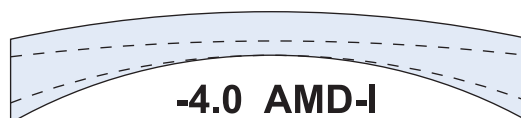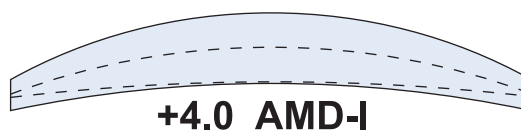

LENTI AMD COMFORT TEST BOX

Ref. M09050

Due paia AMD COMFORT su aggiuntivo.

- 01 Flip-up con lenti AMD COMFORT-I (Ingrandimento 3%, Filtri C1 +AR)
- 01 Flip-up con lenti AMD COMFORT-II (Ingrandimento 6%, Filtri C1 +AR)



LENTI AMD COMFORT FLIPPER KIT

Ref. M09046

Flipper con lenti piane AMD COMFORT.

- 1 coppia AMD-I
- 1 coppia AMD-II

**Ref. M09003**

- 01 Flip-up con lenti AMD COMFORT-I (Ingrandimento 3%, Filtri C1 +AR)

**Ref. M09006**

- 01 Flip-up con lenti AMD COMFORT-II (Ingrandimento 6%, Filtri C1 +AR)



AMD COMFORT SU PRESCRIZIONE.
Contattateci per maggiori informazioni
info.ipovisione@centrostyle.it
Tel: 0332 270210